



Dr Christine ROUSSEAU [73]



FACILE À POLIR

Avant l'utilisation de ce produit, j'ai bien sûr utilisé d'autres composites flow, mais ce matériau permet de simplifier le protocole opératoire puisque l'on peut l'appliquer directement. C'est en effet une réelle évolution pour le praticien. Dans le cadre de mon exercice, je traite beaucoup de dents de patients âgés d'environ « six ans ». C'est le produit idéal pour faire des scellements de sillons bien plus rapidement qu'auparavant, car, comme nous l'avons tous testé, les enfants n'aiment pas les soins qui durent trop longtemps... Malgré tout, je préfère passer un etchant en première intention, ce qui assure l'obtention d'un bon collage et permet de travailler en toute sécurité. Je n'ai pas encore commencé à traiter les dents de lait, je pense que ce sera une bonne indication. Je regrette de n'avoir pas pu le tester dans d'autres teintes, ce qui permettrait d'avoir de meilleurs résultats esthétiques. Le produit durcit correctement, il est facile à polir. Malgré un prix que je trouve un peu trop élevé, c'est un progrès qui mérite qu'on l'adopte pour sa facilité d'utilisation et, particulièrement, dans cette période où le protoxyde d'azote vient d'être autorisé à nouveau.

JE LUI DONNE 8 / 10

Dr Patrice RAIVO [33]



UN EXCELLENT MIMÉTISME

Je l'utilise pour les cavités peu importantes et sensibles. Après application du laser pour disséquer la dentine, il est facile à mettre en place et permet des traitements propres et rapides. J'apprécie son mimétisme (on peut couvrir la palette des teintes entre A1 et A3, avec A2). Il durcit parfaitement et se polit très facilement. Je l'utilise en suivant les recommandations du fabricant. Travaillant secteur après secteur, je constate son comportement à chaque visite. Les patients ne présentent pas de défauts apparents. C'est le produit que je cherchais. Il se tient bien en bouche au placement, ne coule pas trop et se polymérise facilement. Mieux vaut remplir les cavités en plusieurs couches pour éviter des débordements intempestifs... Les résultats sont surprenants car toutes les étapes fastidieuses génératrices d'erreurs sont supprimées. Tout est facile, même avec des lésions, où la mise en place de la digue s'avère impossible.

JE LUI DONNE 10 / 10

Dr Fabienne LEBLOND [49]



TOUT SE FAIT EN UN TEMPS

Je viens de revoir un patient sur lequel j'avais utilisé ce matériau il y a maintenant un an. Tout est toujours en place et en parfait état. La facilité ? Tout se fait en un seul et même temps : mordantage, encollage et mise en place du matériau. Ce produit est tout à fait indiqué pour tous les patients qui ne supportent pas les soins trop longs, les enfants par exemple mais aussi les personnes âgées et / ou handicapées. C'est le produit idéal de remplacement des verres ionomères pour toutes les petites cavités. Je le réserve aux classes I : si la cavité est un peu profonde, je monte mon obturation en plusieurs couches. J'ai même essayé de reconstituer un petit bord incisif fracturé et, pour l'instant, ça marche. C'est un composite flow : sa fluidité est donc un handicap, mais j'ai la certitude que le produit mouille toutes les parois des cavités. J'ai pu constater qu'il présente une bonne dureté, qu'il n'y a pas de détérioration des marges, qu'il offre un excellent mimétisme grâce aux teintes offertes (en particulier avec les teintes les plus utilisées, c'est-à-dire A2 et A3) et qu'enfin, il permet un polissage facile et que l'on obtient une surface lisse et brillante. Je n'ai constaté à ce jour aucun retour défavorable. Sa facilité d'utilisation et les résultats constatés me semblent être un progrès pour cette catégorie de matériaux. Je le recommande à mes confrères.

JE LUI DONNE 8,5 / 10

SYSTÈME DE PRÉPARATION CANALAIRE

Endo sans stress ?

EndoEXPRESS

- Sans risque de casse,
- Sans stress canalaire,
- Un tranchant exceptionnel,
- 100% des débris évacués,
- Un système 100 % reproductible
- 5 x plus économique !

1. Contre-Angle réducteur à mouvement alternatif 30°

2. Limes à méplat "Safe Sider"

L'Endo-Express est un système unique et complet garantissant une réalisation facile, rapide et sûre des préparations canalaires. L'Endo-Express fonctionne à l'aide de limes spécialement profilées Safe Sider utilisables sur un contre-angle à mouvement alternatif.

Les limes "Safe Sider" présentent un méplat breveté qui s'associe au mouvement alternatif du contre-angle, pour garantir un alésage mécanique optimal du canal. Elles permettent ainsi de réaliser des préparations de conicité O2 à O8 en seulement quelques passages, sans risque de casser l'instrument.

RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES DE VISITE :

C'Dentaire
Source d'innovations

www.cdentaire.com - Tél. 04 90 21 51 51 / 00