

„Cleanic: Klinische Anwendung einer anerkannten Prophy-Paste auf Perlite-Basis“

Dr. Fabio Cosimi D.D.S.

Dr. Susanna Giovannini D.I.

I-Ostia Lido, Rom

Die Prophy-Paste Cleanic® von Kerr zeichnet sich durch eine cremige und homogene Konsistenz und einen angenehm frischen Geschmack aus, der nicht zu intensiv und vom Patienten gut angenommen wird.

Dank dieser Cremigkeit und des geschickten Einsatzes von Bindemitteln ist diese Paste praktisch in der Anwendung. Dargereicht in der Tube, verbleibt die Paste bei der Anwendung sowohl mithilfe von Gummikelchen als auch mit Reinigungsbürste kompakt auf der Zahnoberfläche, und so bleibt dem Patienten das unangenehme Gefühl von körnigen Überresten im Mundraum erspart.

In den ersten Sekunden ihrer Anwendung (Reinigungsfunktion) entfernt die Cleanic® Paste gründlich die auf äussere Einflüsse zurückzuführenden Verfärbungen, die sowohl von Chlorhexidin als auch von Zigarettenrauch hervorgerufen sein können (wenn letztere bei einem Patienten mit tps noch nach 6 Monaten vorhanden sind, werden mehrere Anwendungen benötigt).

Nach zirka 8 Sekunden Anwendung geht die Paste automatisch zu ihrer Polier- und Glanzwirkung über, welche die Zähne dank der Perlite-Technologie, die ihrer Formulierung zugrunde liegt, glatt und besonders glänzend werden lässt.

Nach unseren üblichen Maßnahmen zur professionellen Oralhygiene (debridement, scaling und root-planing) verbleibt die Cleanic® Paste im Gegensatz zu den anderen im Handel befindlichen Pasten nur geringfügig oder überhaupt nicht im Sulkus.

Die neue Generation der Reinigungsbürste Pro-Brush™ ist für Patienten mit Zahnengstand oder Fehlstellungen wesentlich praktischer, weil der Kunststoffteil, der den herkömmlichen Metallteil ersetzt, eine grössere Rotierung der Bürste erlaubt und die Nachbarzähne nicht beschädigt.

Hingegen wurden die Gummikelche Pro-Cup® entwickelt, um – im Gegensatz zu den herkömmlichen Gummikelchen – ein Spritzen der Pasten zu vermeiden.

Vorher



Verfahren



Nachher

