

Cleanic : une bonne pâte de nettoyage et de polissage sous une nouvelle présentation

Vreni Steinegger, diplômée en hygiène dentaire HF, CH-Bienne

Les pâtes prophylactiques sont utilisées depuis des dizaines d'années. Ces dernières années, des pâtes contenant des agents abrasifs de la nouvelle génération ont été développées. Cleanic de KerrHawe en est une des plus importantes.

Jusqu'à présent, la pâte prophylactique Cleanic était disponible en portions individuelles ou en pot. Les portions individuelles sont souvent trop grandes. En pot, la pâte Cleanic peut dessécher en fonction de son utilisation ou de l'ouverture du couvercle.

Maintenant, Cleanic est aussi disponible en tube. J'apprécie beaucoup ce nouveau conditionnement, car il permet le prélèvement hygiéniquement irréprochable d'une certaine quantité (**Figures 1 et 2**).



Fig. 1 (gauche) : Cleanic en tube

Fig. 2 (droite) : Dosage simple de la pâte dans le godet-bague (Prophy-Clip)

L'agent abrasif Perlite contenu dans cette pâte est particulier : l'abrasivité est plus forte au début. En cours d'utilisation, les plaquettes de perlite diminuent de taille et s'arrondissent. La pâte prophylactique universelle devient plus fine. D'un point de vue clinique, les dents de patients rappelés sont d'abord nettoyées grâce au comportement dynamique des plaquettes de perlite. Après quelques secondes, la pâte se transforme et effectue un doux polissage, conférant ainsi à l'émail un bel éclat.

La dentine découverte par un déchaussement est polie avec beaucoup de précaution à la fin seulement. Les patients ne se plaignent pas d'apparition de sensibilité dentaire après le traitement. Pour appliquer la pâte prophylactique Cleanic, j'utilise également les

godets de polissage (Prophy-Clips) et l'écarteur Optiview pour améliorer la visibilité dans la cavité buccale (**Fig. 3 et 4**).



Fig. 3 (gauche) : Application de la pâte prophylactique Cleanic avec OptiView (visibilité et accessibilité)

Fig. 4 (droite) : Application de la pâte prophylactique Cleanic sur les dents latérales

J'apprécie énormément ce nouveau conditionnement. Il apporte une amélioration nette de l'hygiène et je peux choisir moi-même la quantité de pâte à prélever et ne suis pas limitée aux 2 g de pâte comme avec les doses individuelles Cleanic.

Mon travail quotidien – dans lequel le temps, l'hygiène et le confort du patient jouent un rôle prépondérant – en devient plus facile, ce qui me permet d'être plus attentionnée dans ma relation avec mes patients.