

“Cleanic: l’utilizzo clinico di una riconosciuta pasta per profilassi a base di Perlite”

Dr. Fabio Cosimi D.D.S.

D.ssa Susanna Giovannini D.I.

I-Ostia Lido, Roma

La pasta per profilassi Cleanic® di Kerr si presenta con una consistenza cremosa ed omogenea, un sapore gradevole e fresco, non troppo forte e ben tollerato dal paziente.

Questa cremosità ed il sapiente impiego di agenti leganti hanno reso la pasta comoda nell’utilizzo. Confezionata nel tubo, infatti, sia usata con le coppette che con gli spazzolini, la pasta rimane più compatta sulla superficie del dente, evitando così la sgradevole sensazione della presenza di residui granulosi nella cavità orale del paziente.

Durante i primi secondi d’applicazione (azione pulente o di cleaning), la pasta Cleanic® riesce a rimuovere bene le discromie estrinseche provocate sia da clorexidina che dal fumo di sigaretta (se quest’ultime sono presenti in un paziente con tps a 6 mesi è necessario effettuare più passaggi).

Dopo ca. 8 secondi d’applicazione, la pasta passa automaticamente alla sua azione di polishing o lucidatura grazie alla tecnologia della Perlite che sta alla base della sua formulazione, rendendo il dente liscio e particolarmente lucido.

Dopo le nostre usuali manovre di igiene orale professionale, (debridment, scaling e root-planing) la pasta Cleanic®, rispetto alle altre in commercio, si presenta meno o quasi per niente nel solco gengivale.

Gli spazzolini di nuova generazione Pro-Brush™ risultano essere molto comodi con pazienti che presentano sovraffollamento o malposizioni dentali in quanto la porzione plastificata che sostituisce la classica in metallo permette una rotazione maggiore dello spazzolino, non creando danni ai denti contigui.

Le coppette Pro-Cup® sono invece state studiate e sviluppate per evitare la produzione di schizzi delle paste rispetto alle coppette tradizionali.

Prima



Procedura



Dopo

