

Pasta per profilassi universale Cleanic con tecnologia Perlite per la pulizia e per un elevato effetto lucidante

Prof. a.c. C.L.I.D. Giancarlo Pongione, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia.

Nel corso di sei mesi è stata condotta una sperimentazione su un gruppo di 50 pazienti fumatori con forti macchie sui denti (**figura 1**). Lo scopo consisteva nel valutare l'efficacia della rimozione di placca e macchie tramite la riconosciuta pasta per profilassi **Cleanic**[®] di Kerr, da poco disponibile anche confezionata in tubo (**figura 3**).

L'unicità di questa pasta universale sta nella tecnologia a base di Perlite che permette una pulizia efficace ed un elevato effetto lucidante in una sola applicazione. Dopo la detartrasi eseguita con ultrasuoni è stato eseguito un cleaning combinato automaticamente ad un polishing tramite **Cleanic**[®]. La pasta è stata applicata con spazzolini del tipo **Pro-Brush**[™] (Kerr).

Grazie al giusto grado di viscosità, adattata rispetto alle versioni precedenti, è stato molto semplice distendere la pasta sulle superfici dentali. Anche l'estrusione dal tubetto è risultata ottimale. Lo spazzolino con la pasta **Cleanic**[®] è stato tenuto sulle superfici da pulire e lucidare per il tempo necessario a rimuovere le macchie (**figura 2**), tenendo presente che la Perlite contenuta nella pasta garantisce l'azione pulente nei primi ca. 5-7 secondi dell'applicazione, mentre quella lucidante subentra tra ca. 7-15 secondi e che idealmente vengono trattati gruppi di ca. 3 denti per volta.



Figura 1: prima dell'applicazione di Cleanic[®]



Figura 2: dopo l'applicazione di Cleanic[®]

Al termine della seduta di igiene orale è stato consegnato ai pazienti un questionario dove si chiedeva loro di esprimere un giudizio circa il gusto della pasta (menta) ed il grado di soddisfazione, quest'ultimo valutato in base al grado di rimozione delle macchie ed alla sensazione di lucidatura finale percepita.

Le risposte dei pazienti hanno evidenziato in generale un alto grado di soddisfazione.

In conclusione possiamo affermare che la pasta Cleanic® si è dimostrata particolarmente efficace nel rimuovere i pigmenti. L'effetto della pasta porta a delle superfici dentali lucide che consentono di mantenere più a lungo i risultati ottenuti con il polishing.



Figura 3: Pasta per profilassi universale Cleanic® – da poco disponibile anche in tubo