

Cleanic in een tube – De Recall Patiënt: Schoonmaken en Polijsten

A. Lund DDS, Tannlege MNTF, N-5015 Bergen

De meeste patiënten die regelmatig de praktijk bezoeken voor controle komen elke 6 of 12 maanden in de stoel.

De controle omvat zonodig een of meer röntgenopnamen, controle van de elementen, restauraties, zachte weefsels, kaak, kauwspieren en de toestand van de mondhygiëne.

Een grondige reiniging van het gebit is in het belang van een goede profylaxe geïndiceerd. Voor de meeste patiënten is dit de belangrijkste reden voor het regelmatige bezoek aan de praktijk en het is zeker het meest gewaardeerde onderdeel van welke behandeling dan ook. Voor tandsteen en resistent vuil wordt een ultrasone of roterende scaler gebruikt. Voor hardnekkige verkleuringen bij zware rokers en koffie-/theedrinkers is polijsten met puimsteen geïndiceerd.

In veel gevallen is niet meer dan een eenvoudige polijstbeurt voldoende om onnodige abrasie van de harde weefsels te voorkomen.

New Cleanic® is verpakt in een zeer handige tube, waaruit zeer gemakkelijk exact de benodigde hoeveelheid kan worden geknepen. Zijn viscositeit is zodanig dat het materiaal in de prophycup blijft en de frisse smaak wordt door de patiënten op prijs gesteld.

Als gevolg van de duidelijke kleur van Cleanic en een geringe kleverigheid is het makkelijk te zien welke gebieden schoon zijn gemaakt.

Voor de gemiddelde patiënt die elke zes maanden de praktijk bezoekt volstaat doorgaans het verwijderen van tandsteen van de snijtanden onder in combinatie met een polijstbeurt met Cleanic. De reacties van de patiënten sinds wij in onze praktijk Cleanic in tubes zijn gaan gebruiken, zijn zeer positief.

De getoonde casus betreft Margrethe, een vrouw van 40 jaar, die een stevige theedrinkster is. Het was 12 maanden geleden dat zij de praktijk had bezocht, zodat de opgetreden verkleuringen en de aanwezige geaccumuleerde plak een volledige behandeling met scaler en puimsteen noodzakelijk maakten, inclusief een afwerking met Cleanic. De behandeling duurt kort en is niet belastend. Zoals eerder vermeld: het afwerken met Cleanic geeft, mede door zijn frisse smaak, de patiënt altijd een goed gevoel.

Vóór



Vóór



Applicantie



Na



Na

