

Cleanic: een uitstekende reinigings- en polijstpasta in een nieuwe verpakking.

Vreni Steinegger, mondhygiëniste, CH-Biel/Bienne

Prophypasta's bestaan er reeds sinds tientallen jaren. Door de constante ontwikkelingen zijn er thans verschillende typen verkrijgbaar. Cleanic[®] van KerrHawe is daar een van de beste van en de meest betrouwbare van zijn generatie.

De eenpersoons doses Cleanic[®] Prophy pasta waren in potjes reeds verkrijgbaar. De hoeveelheid van elke individuele dosis was dikwijls te groot, waardoor afval ontstond. Meerdere malen openen van het potje was er de oorzaak van dat de inhoud indroogde en dat daardoor de pasta moeilijk aan te brengen was.

Cleanic[®] is nu in tubes verkrijgbaar. Deze nieuwe verpakking wordt door mij zeer op prijs gesteld, daar ik nu in staat ben precies de juiste hoeveelheid, die ik voor de patiënt nodig heb, uit te nemen.



Afb. 1 (links): Cleanic[®] in de tube

Afb. 2 (rechts): Eenvoudig doseren in de polijstpastahouder (Prophy-Clip)

Het abrasieve Perlite, dat in deze pasta zit, is zeer speciaal: zijn abrasieve eigenschappen zijn geoptimaliseerd op een wijze dat in de loop van het gebruik de deeltjes kleiner worden en meer afgerond. Daardoor wordt de prophypasta fijner en minder abrasief.

Vanuit klinisch oogpunt bezien worden de elementen van de patiënten, die voor een recall komen, dank zij het dynamische gedrag van het Perlite gereinigd.

De eigenschappen van de pasta veranderen na enkele seconden gebruik: de pasta wordt milder. Er treedt duidelijk een polijstend effect op en het glazuur krijgt een zeer

mooie glans. Als de tandhalzen zichtbaar zijn wordt ook het dentine voorzichtig gepolijst. Patiënten klagen na deze behandeling niet over gevoelige tandhalzen.

Bij de applicatie van Cleanic[®] gebruik ik ook de overeenkomstige polijstcups (Prophy-Clips) en de OptiView[™] houder, om daarmee een beter overzicht in de mond te hebben (**Afbeeldingen 3 en 4**).



Afb. 3 (links): Gebruik van de prophypasta Cleanic[®] met OptiView[™] (overzicht en toegankelijkheid).

Afb. 4 (rechts): Gebruik van de prophypasta Cleanic[®] in het laterale gebied.

Ik ben enthousiast over deze innovatieve manier van verpakken. Het betekent zeker een verbetering in respect tot de hygiëne en ik ben er vrij in om te bepalen of ik meer of minder dan 2 gram (de individuele dosis van Cleanic[®]) polijstpasta gebruikt.

Het draagt er aan bij om mijn dagelijks werk – waar tijd, hygiëne en patiëntencomfort een belangrijke rol spelen – makkelijker te maken wat betreft de techniek en ik kan daardoor mijn patiënten meer aandacht geven.