

Cleanic en Tubo, Chicle y Manzana

Una pasta para profilaxis muy efectiva y lista para usar con nuevos sabores

Susana Cruz Vasquez
Higienista Dental, E-Daganzo Madrid/España

Introducción

Este estudio evalúa la percepción que tiene el paciente de la pasta para profilaxis **Cleanic®** de KerrHawe. En particular de los nuevos sabores **Chicle, Manzana y Menta** presentados en Tubo.

Descripción del Producto: Cleanic® y Pro-Cup®

Desde hace varios años se vienen usando productos Profilácticos/Limpiadores para la higiene oral. Si bien estos productos son eficaces, la mayoría de ellos son excesivamente abrasivos. La investigación y el desarrollo de un sistema eficaz, eficiente y no perjudicial, de pasta para profilaxis ha requerido un esfuerzo considerable.

La **Tecnología Perlita** de Cleanic hace que esta pasta sea única. Es altamente eficiente y sin embargo suave con la estructura dental, presentando un valor bajo de **RDA**, solo **27**. Proporciona una acción integrada de limpieza y pulido: durante los primeros segundos de su aplicación (alrededor de 7) la pasta presenta la máxima potencia de limpieza. Debido a la perlita las partículas se transforman de gruesas a finas y pasados 15 segundos Cleanic® se transformará en una pasta de pulido de alto brillo. Los profesionales dentales valorarán la reducción del tiempo que Cleanic® -una pasta profilaxis universal todo en uno- ofrece y los pacientes apreciarán los nuevos y agradables sabores (Imagen 1).

Los comentarios positivos de los pacientes en estudios han animado a KerrHawe a lanzar los nuevos



Imagen 1. Pasta para profilaxis Cleanic® en tubos

sabores Manzana verde y Chicle, complementando así el clásico sabor a Menta que ya existía. Estas nuevas pastas se presentan en un tubo fácilmente reconocible codificado por el color de su sabor.

El sabor **Manzana Verde** no contiene **mentol** y es adecuado para pacientes que reciben tratamientos homeopáticos. El mentol es un aceite esencial que interfiere en este tipo de terapia. Por esta razón en el pasado, a los pacientes homeopáticos se les aconsejaba no cepillarse los dientes o evitar sesiones de higiene con pastas que contuvieran mentol en el plazo de tres horas previas y posteriores a su tratamiento homeopático.

Ahora estos pacientes pueden seguir su tratamiento sin que esto interfiera con su sesión de higiene. También

se recomienda el uso de pastas para profilaxis sin mentol a pacientes sometidos a tratamientos para el cáncer oral.

Cleanic® está disponible en Tubos (100g/todas las versiones con flúor), cartuchos (100 ó 200g/disponible con o sin flúor) y en dosis individuales (2g unidad/con flúor). Las primeras dos presentaciones ahorran en consumo de producto, permitiendo la dosificación exacta adaptada a las necesidades de cada paciente. La versión en mono dosis individual es desechable, por lo que previene la infección cruzada. Cleanic® -especialmente en Tubo- no requiere añadir agua gracias a su suave consistencia cremosa.

Otro factor a considerar es la incidencia del incremento de las alergias al látex. KerrHawe ha desarrollado las copas



Imágenes 2 y 3. Pro-Cup® dura (izquierda, azul oscuro) y blanda (derecha, azul claro)

sin látex **Pro-Cup®**, la exclusiva copa de goma que permite aplicar pasta sin salpicaduras gracias a su especial perfil laminado interior y exterior. Con esta innovadora tecnología, Pro-Cup® impulsa la mezcla de pasta y saliva de forma efectiva hacia el final de la copa helicoidal, dejando la pasta en permanente contacto con el diente, a la vez que se reduce la fricción. Las características de **Pro-Cup®** son importantes en comparación con otras copas de goma disponibles en el Mercado. **Pro-Cup®** está disponible en color azul claro (blanda) y azul oscuro (dura), en versiones normal y pequeña. (Imágenes 2 y 3).

Metodología y Materiales

El informe abarca varios aspectos:

- La opinión del paciente en relación al sabor y consistencia de los dos nuevos productos;
- La información del paciente sobre el uso de pastas para profilaxis sin mentol y copas de goma sin látex para evitar cualquier posible caso de alergia.

El estudio se basa en la participación voluntaria de 50 personas (18 hombres y 32 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 50 años), con un mínimo de 28 dientes.

Se diseñó un cuestionario para establecer y registrar los hábitos de higiene

del paciente. A continuación, el paciente fue invitado a elegir un sabor (Manzana verde, Menta y Chicle). El historial médico fue también actualizado para



Imagen 4. OptiView® pequeño (azul claro)

registrar cualquier cambio en la historia o toma de medicamentos durante el año.

Una vez preparado el material necesario, el paciente fue equipado con **Opti-View®**, un retractor de labios y mejillas muy cómodo fabricado por KerrHawe, que permite una mejor visualización y acceso para el profesional. El producto está disponible en tamaño normal (color blanco) y pequeño (azul claro) (Imagen 4). Se aplicó Vaselina en los labios y esquinas, para prevenir irritaciones antes de colocar **OptiView®**.

Después de desincrustar la placa, se llevó a cabo la profilaxis dental. Se dispensó la cantidad suficiente de Cleanic® en el **Prophy-Clip®** esterilizable en autoclave, y se usó Pro-Cup® para aplicar la pasta en los dientes (Imágenes



Imagen 5. Cleanic® Manzana y Prophy-Clip



Imagen 6. Cleanic® Manzana en aplicación



Imagen 7. Cleanic® Chicle en aplicación



Imagen 8. Cleanic® Manzana en aplicación



Imagen 9. Cleanic® Chicle en aplicación

5, 6, 7, 8 y 9). Para una mayor eficacia, limpieza de gran alcance y acción de pulido, cada grupo de tres dientes debe tratarse con una porción de pasta durante 15 segundos aprox. La pieza de mano no debe funcionar a una velocidad superior a 3000rpms.

Resultados

La encuesta muestra que cuando se les ofrece la gama de tres sabores, la mayoría de los pacientes (80%) eligió la menta clásica, probablemente debido a que tradicionalmente todas las pastas de profilaxis se han ofrecido con este sabor y el sabor fresco fuerte está asociada con una sensación subjetiva de limpieza y un aliento fresco.

Cuando se presentan varios gustos con la

sugerencia de probar un nuevo sabor, sólo el 20% se niegan a cambiar su decisión inicial (sabor a menta):

- Los pacientes que optaron por **Chicle** dijeron que les recordaba su infancia (pastas dentales, caramelos) y disfrutaron de su intenso y agradable aroma;
- Los pacientes que seleccionaron **Manzana verde** expresaron que, incluso sin mentol, la pasta era fresca y con una sensación similar a la menta, pero sin el picor.

Todos los pacientes apreciaron la cortesía de los profesionales al ofrecerles una opción, una nueva sensación y la experiencia durante la sesión de la higiene.

Conclusiones

El nuevo **Cleanic® en Tubos** presenta mejor rendimiento si se aplica con **Pro-Cup®**, permitiendo una limpieza eficaz y pulido de todas las superficies dentales. El bajo valor **RDA** de Cleanic (27) permitió una limpieza eficaz con el mínimo desgaste de los tejidos duros y sin irritación de los tejidos blandos.

Los nuevos sabores **Chicle** y **Manzana verde** proporcionan la ventaja de ofrecer varias opciones para el paciente y, específicamente, para aquellos que pidan una pasta sin mentol.

Cleanic® en tubos tiene una consistencia cremosa y es fácil de aplicar en comparación con otros productos disponibles en el mercado.